

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PERO K OŠETŘENÍ KOUSNUTÍ HMYZEM



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

- Jedná se o ruční zařízení, které uživateli umožňuje aplikovat terapeutickou dávku tepla přímo na hmyzí štípnutí nebo žihadlo. Díky tomu dojde k rozkladu toxinů, které způsobují bolest, otok a svědění.
- Je to klinicky prověřený výrobek poskytující dočasnou úlevu od bolesti, svědění a otoku vzniklých v důsledku bodnutí hmyzem nebo žihadla.
- Umožňuje uživateli vybrat si buď 3 sekundové tepelné ošetření, nebo delší, 6 sekundové ošetření.

INDIKACE

Přístroj je indikován k poskytnutí dočasné úlevy od bolesti a svědění vzniklých v důsledku bodnutí hmyzem jako například vosy, včely a komára. Pracuje na principu zvýšení lokálního krevního průtoku.

KONTRAINDIKACE

- ! Nepoužívejte na sliznice (např. uvnitř úst, v nose atd.)
- ! Není určen k použití na nebo okolo očí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před ošetřením odstraňte z místa bodnutí žihadlo.
2. Aplikátor (kulatý bílý disk na hrotu výrobku) přiložte přímo na kůži v místě štípnutí.
3. Vyberte si buď 3 sekundové ošetření (levé tlačítko) nebo 6 sekundové ošetření (pravé tlačítko).
4. Zmáčkněte tlačítko a okamžitě stlačení uvolněte. LED dioda bude během ošetření svítit a po skončení ošetření uslyšíte pípnutí a spolu s ním se LED dioda vypne.
5. Ošetření lze opakovat dle potřeby.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- ➡ Nefunguje proti jedu pavouků, škorpiónů nebo hadů.
- ➡ Je určen pro úlevu od bolesti okamžitě po hmyzím bodnutí. V případě alergie na tento hmyz (nebo v případě přetrvávající bolesti) okamžitě navštivte lékaře.
- ➡ Není určen k tomu, aby nahrazoval lékařskou radu nebo ošetření. Pokud je bolest silná nebo vytrvalá konzultujte s lékařem.

- ➡ Nepoužívejte v blízkosti oka nebo na slizničních membránách (např. uvnitř úst nebo v nose)
- ➡ Osoby s poruchou citlivosti vzniklou na základě jejich fyzického nebo zdravotního stavu, by měly být při používání přístroje extrémně opatrné. Pokud jste na pochybách, kontaktujte před aplikací lékaře.
- ➡ Není doporučeno pro děti mladší 3 let.
- ➡ Děti mladší 12 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- ➡ Jedná se o zdravotnický prostředek.